

ACCUCHEK® Active

Roche

LT

NAUDOJIMO NURODYMAI

PIRMOJO NAUDOJIMO VADOVAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS



Uždusimo pavojus

Šiame produkte yra smulkių dalių, kurias galima nuryti. Mažas dalis laikykite atokiau nuo mažų vaikų ir žmonių, kurie gali jas nuryti.

Sunkaus sveikatos sutrikdymo rizika

Netinkamas matuoklio ir dūrimo prietaiso naudojimas gali sukelti sunkių sveikatos problemų arba žalą sveikatai.

Šis pirmojo naudojimo vadovas nepakeičia visų naudotojo vadovų, pateiktų su matuokliu ir dūrimo prietaisu.

Būtinai laikykitės saugos informacijos, pateiktos naudotojo vadovuose. Perskaitykite tyrimo juostelių pakuotės lapelį.

Infekcijos rizika

Jeigu šiuo dūrimo prietaiso naudojasi ir kiti asmenys, taip pat ir šeimos nariai, arba sveikatos priežiūros specialistai naudoja tą patį dūrimo prietaisą įvairių pacientų kraujui paimti, gresia užkrečiamų ligų infekcijos pavojus.

Accu-Chek Softclix dūrimo prietaisais yra skirtas tik asmeniniam naudojimui!

Jo negalima naudoti paimti kraujo iš daugiau nei vieno asmens. Dūrimo prietaisais nėra skirtas profesionaliam naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose.

Infekcijos rizika

Bet koks daiktas, turintis sąlytį su žmogaus krauju, yra potencialus infekcijos šaltinis.

Naudojant matuoklį profesionaliai, reikia atsižvelgti į sveikatos priežiūros specialistams skirtą informaciją (žr. Matuoklio naudotojo vadovo skyrių „Keliems pacientams atliekami tyrimai“).

Apžvalga: Matuoklis ir tyrimo juostelė




- 1 Ekranas
- 2 Mygtukai
- 3 Tyrimo juostelės kreiptuvas
- 4 Tyrimo juostelė

Susipažinkite su Accu-Chek Active matuokliu.
Perskaitykite tyrimo juostelių pakuotės lapelį.


Dūrimo prietaiso paruošimas




Susipažinkite su Accu-Chek Softclix dūrimo prietaisu.

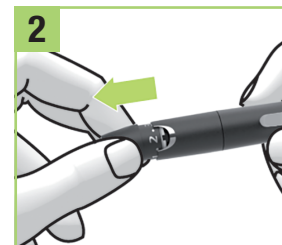


Nuo dūrimo prietaiso nuimkite dangtelį.

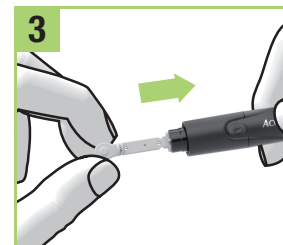


Į lanceto laikiklį įdėkite naują lancetą.
Turite girdėti, kaip lancetas užsifiksuoja.

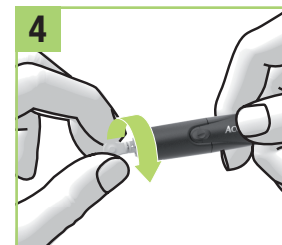

Sukamuoju judesiu nuimkite apsauginį dangtelį nuo lanceto.

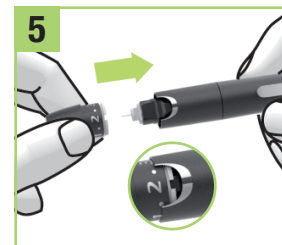

Uždėkite dangtelį atgal ant dūrimo prietaiso. Turite girdėti, kaip dangtelis užsifiksuoja.

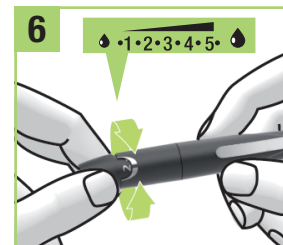

Sukite dangtelį, kol nustatysite pageidaujimą dūrimo gylį.
Pradėkite nuo mažo dūrimo gylio nustatymo, pvz., 2.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Infekcijos rizika

Panaudoti lancetai nebėra sterilūs. Imdami kraują, visuomet naudokite naują lancetą. Tai darydami sumažinsite infekcijos riziką, o kraujo paėmimas bus beveik nesukeliantis skausmo.

PASTABA

Jei jums reikia papildomos pagalbos dėl Accu-Chek Active matuoklio ar Accu-Chek Softclix dūrimo prietaiso, susisieki su klientų klientų palaikymu.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07

CE 0123

ACCUCHEK ir SOFTCLIX yra Roche prekių ženklai.


© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com


Glikozės kiekio kraujyje tyrimas



Nusiplaukite rankas šiltu vandeniu ir muilu. Prieš imdami kraują, gerai išdžiovinkite rankas.

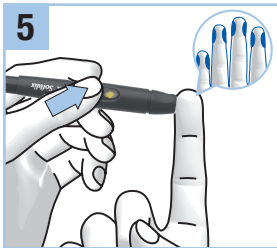


Prispauskite dūrimo prietaisą prie pasirinktos dūrio vietos piršto gale. Paspauskite geltoną paleidimo mygtuką.

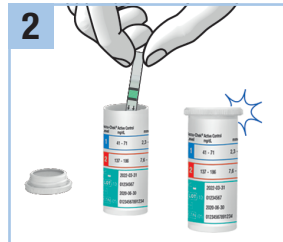

Paimkite vieną tyrimo juostelę iš tyrimo juostelių indelio. Sandariai uždarykite dangtelį.




Kai ekrane pasirodo mirksintis lašo simbolis: Palieskite kraujo lašą tyrimo vietos vidurinę dalį (žalias kvadratas).

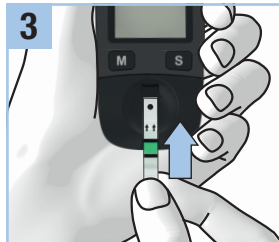


Stengdamiesi nesulenkti įkiškite tyrimo juostelę rodyklių kryptimi į tyrimo juostelių kreiptuvą.



Mirksintis smėlio laikrodžio simbolis rodo, kad vyksta tyrimas.

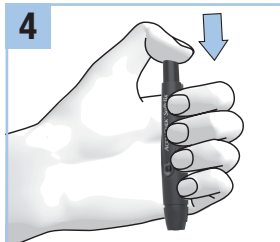


Paspauskite užtaisymo mygtuką iki galo. Dūrimo prietaisas užtaisytas, kai paleidimo mygtuko vidurys yra geltonos spalvos.

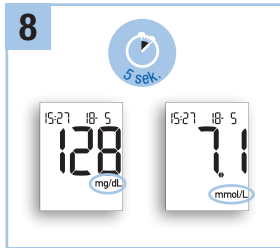

Maždaug po 5 sekundžių tyrimo rezultatas bus rodomas ekrane ir matuoklis supypsės.

Lanceto išmetimas

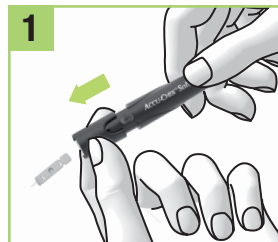

Nuo dūrimo prietaiso nuimkite dangtelį. Pastumkite išmetiklį į priekį. Panaudotas lancetas išstumiamas iš dūrimo prietaiso.

⚠️ ATSARGUMO PRIEMONĖ

Infekcijos rizika

Panaudoto lanceto adata nėra apsaugota ir gali būti netyčia paliesta. Siekiant užkirsti kelią infekcijų perdavimui, panaudotą lancetą utilizuokite taip, kad nekiltų pavojus susižeisti adata.

Vėl uždėkite dangtelį.

Klaidos pranešimai

Jei įvyksta klaida, vykdykite šias instrukcijas. Išjunkite matuoklį. Priklausomai nuo situacijos, galite išjungti matuoklį vienu metu paspausdami „M“ ir „S“ mygtukus arba ištraukdami tyrimo juostelę iš matuoklio.

⚠️ - 1 Laikykite tyrimo juostelę aukštyr nukreiptų rodyklių ir tyrimo vietos padėtyje. Stengdamiesi nesulenkti įkiškite tyrimo juostelę rodyklių kryptimi į tyrimo juostelių kreiptuvą. Tyrimo juostelė turi pajuntamai užsifiksuoti. ARBA Pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juostele. ARBA Išvalykite tyrimo langelį.

⚠️ - 2 Pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juostele.

⚠️ - 4 Išimkite USB laidą ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juostele.

⚠️ - 5 Pereikite į kitą vietą arba išjunkite spinduliuotės šaltinį.

⚠️ - 5 Pereikite į šešėlyje esančią vietą arba pridenkite matuoklį, pvz., savo kūnu.

⚠️ - 5 Pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juostele. Jei vėl rodomas klaidos pranešimas, matuoklis yra sugedęs. Susisieki su klientų palaikymu.

⚠️ - 5 Įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra yra nuo +8 iki +42 °C, ir palaukite, kol matuoklis prisitaikys prie aplinkos temperatūros.