
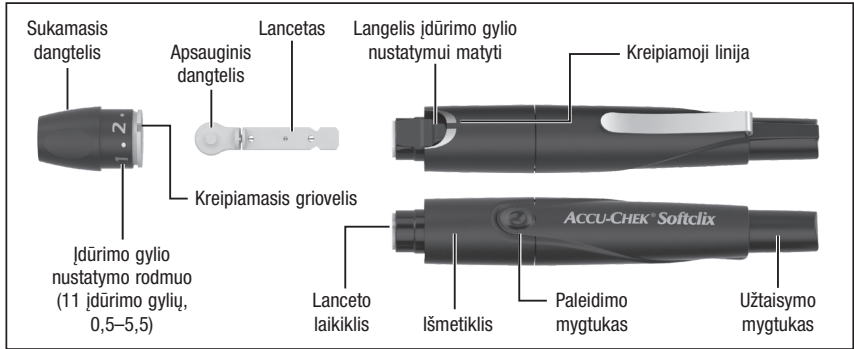
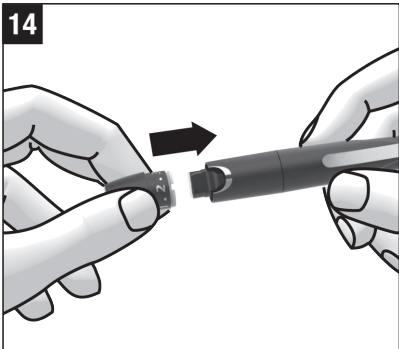
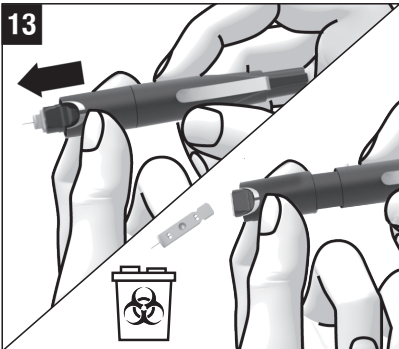
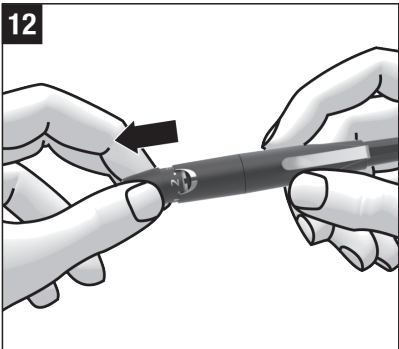
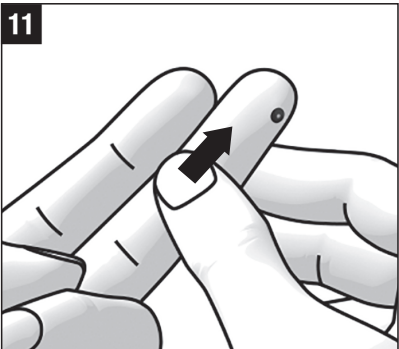
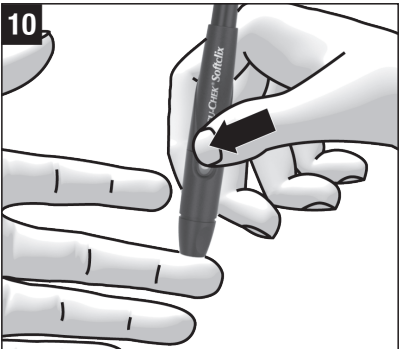
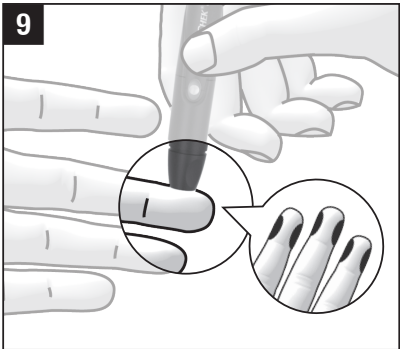
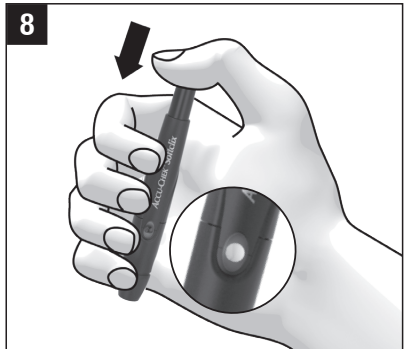
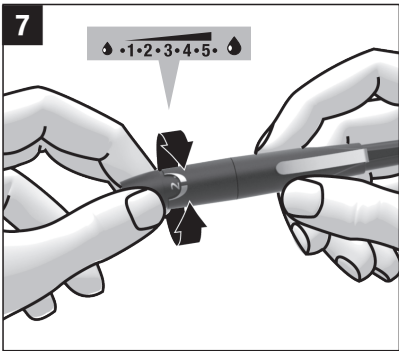
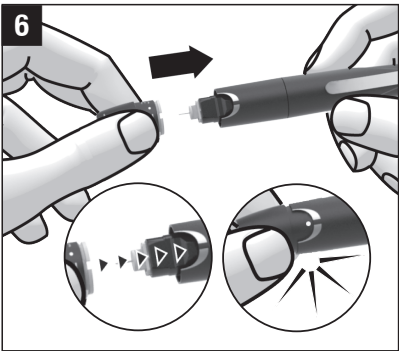
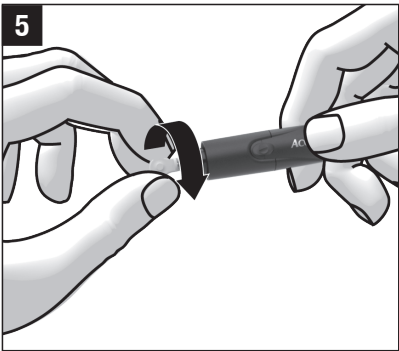
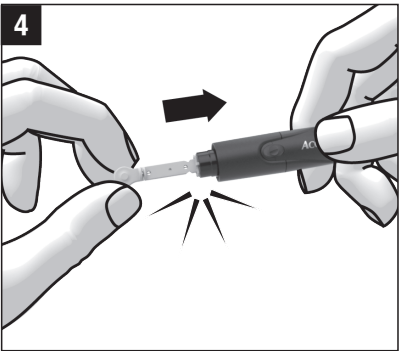
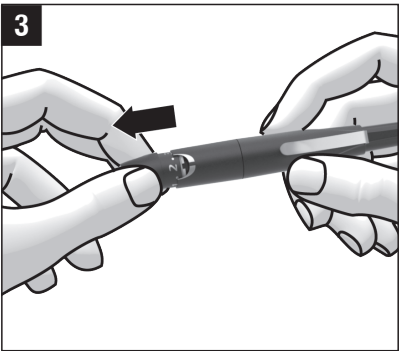
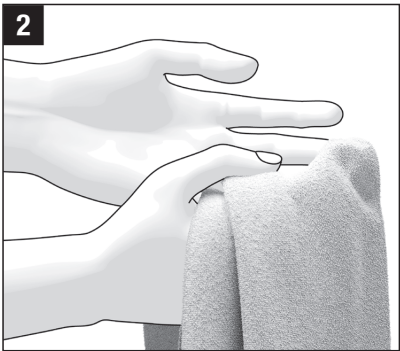


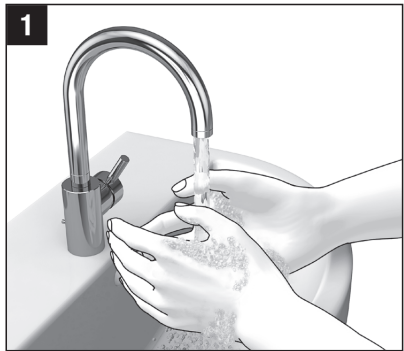

Naudojimo taisyklės

Prieš imdami kraujo lašą iš piršto galiuko, perskaitykite šias naudojimo taisykles.

Naudojimo paskirtis

Dūrimo prietaisas

„Accu-Chek Softclix“ dūrimo prietaisas – tai priemonė, naudojama siekiant lengvai ir beveik be skausmo paimti kapiliarinio kraujo iš piršto galiuko. „Accu-Chek Softclix“ dūrimo prietaisas skirtas naudoti tik vienam pacientui! Juo visada galima imti tik to paties asmens kraują.

Jei dūrimo prietaisu naudosis kiti asmenys, net jei jie yra šeimos nariai, arba sveikatos priežiūros specialistai šiuo dūrimo prietaisu ims skirtingų asmenų kraują, kyla pavojus perduoti infekciją. Todėl šis dūrimo prietaisas nėra skirtas profesionaliam naudojimui sveikatos priežiūros įstaigose. Tai nėra sterilus produktas.

Tikslinė grupė yra diabeto savikontrolę vykdančys asmenys.

Lancetas

„Accu-Chek Softclix“ lancetas ir „Accu-Chek Softclix XL“ lancetas yra vienkartiniai sterilūs lancetai, kurie turi būti naudojami su „Accu-Chek Softclix“ dūrimo prietaisu. Lancetai yra vienkartiniai elementai. Kiekvieną lancetą galima naudoti tik vieną kartą.

„Accu-Chek Softclix“ lancetas ir „Accu-Chek Softclix XL“ lancetas turi būti naudojami su „Accu-Chek Softclix“ dūrimo prietaisu lengvam ir beveik beskausmiam kapiliarinio kraujo paėmimui. Kiekvienas lancetas turi apsauginį dangtelį, kuris užtikrina jo sterilumą iki pirmo naudojimo.

Indikacija

Dūrimo prietaisas skirtas naudoti diabeto savikontrolėi.

Numatytas naudotojas

Sergantieji cukriniu diabetu ir sveikatos priežiūros specialistai arba prižiūrintieji asmenys, padedantys sergantiesiems cukriniu diabetu naudoti produktą.

Tikslinė grupė (taikytina)

Vaikai, paaugliai bei suaugusieji, sergantys diabetu.

Kontraindikacijos

Kontraindikacijų nėra.

Klinikinė nauda

Kartu su lancetu naudojamas dūrimo prietaisas leidžia beveik be skausmo paimti kapiliarinio kraujo.

Bendroji saugos informacija

Naudojimo taisyklėse yra šie įspėjimai ir atsargumo priemonės:

⚠ **ĮSPĖJIMAS** rodo numatomą rimtą pavojų.

⚠ **ATSARGUMO PRIEMONĖ** aprašo priemonę, kurios turėtumėte imtis, kad gaminys būtų naudojamas saugiai ir veiksmingai arba kad jo nesugadintumėte.

ĮSPĖJIMAS

Uždusimo rizika

Šiame produkte yra smulkių dalių, kurias galima nuryti.

Smulkias dalis laikykite atokiau nuo mažų vaikų ir žmonių, kurie gali jas nuryti.

Sužalojimo pavojus

Jeigu įdūrimo gylis per didelis, dūris gali sužaloti vaikų.

Prieš pirmą kartą naudojant dūrimo prietaisą vaikams reikia pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu. Pradėkite nuo mažiausio įdūrimo gylio.

Infekcijos rizika

Jeigu dūrimo prietaisas arba lancetas susilietė su krauju, jis gali pernešti infekcijas.

Dūrimo prietaiso ir lanceto negali naudoti kiti žmonės, net šeimos nariai. Sveikatos priežiūros specialistai negali jų naudoti kraujui iš skirtingų žmonių imti.

Jei dūrimo prietaisas ar lancetas nukrinta ant žemės arba paveikiami kitokio mechaninio poveikio, patikrinkite, ar jie nepažeisti. Pastebėjus pažeidimų, tokių kaip įtrūkiai, dūrimo prietaiso ar lanceto nenaudokite ir išmeskite.

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Sužalojimo pavojus

- Dūrimo prietaisui arba lancetui susilietus su oda gali atsirasti odos dirginimas. Atsiradus odos dirginimui arba uždegimui, pasitarkite su sveikatos priežiūros specialistu.
- Jei lancetu įduriama ne į odą, o į kietą paviršių, adata gali būti pažeista. Lancetą naudokite tik kraujo lašui imti.
- Kai kurios dūrimo prietaiso dalys (pavyzdžiui, užtaisymo mygtukas) naudojimo metu gali iššokti. Nelaikykite dūrimo prietaiso nukreipto į savo veidą ar kitus asmenis.

Į „Accu-Chek Softclix“ dūrimo prietaisą dėkite tik „Accu-Chek Softclix“ lancetus. Su kitais lancetais dūrimo prietaisas gali veikti prasciau arba gali sugesti.

Dūrimo prietaisas skirtas daugkartiniam naudojimui vienam pacientui. Lancetai yra sterilūs, vienkartinio naudojimo gaminiai, sterilizuoti švitinimo būdu.

Patarimai ir gudrybės

Jei dar niekada nenaudojote šio dūrimo prietaiso, rekomenduojame pradėti nuo nedidelio įdūrimo gylio, pavyzdžiui, 2.

Paspaudus užtaisymo mygtuką, tuo pat metu negalima spausiti paleidimo mygtuko.

Dūrimo prietaisas užtaisytas, kai paleidimo mygtuko centras yra geltonos spalvos.

Paprastai kraujas gali būti imamas iš bet kurio piršto. Kai kurie pirštai gali netikti, pavyzdžiui, dėl odos arba nagų infekcijos. Kapiliarinį kraują imkite iš piršto galiuko šono, nes šioje vietoje jaučiamas mažiausias skausmas.

Jei pasirodo nepakankamas kiekis kraujo, imdami kraujo kitą kartą, stipriau prispauskite dūrimo prietaisą. Jei to neužtenka, palaipsniui didinkite įdūrimo gylį. Jei pasirodo per daug kraujo, sumažinkite įdūrimo gylį.

Dūrimo prietaiso naudojimas

ĮSPĖJIMAS

Infekcijos rizika

- Jei lanceto apsauginis dangtelis pažeistas arba jo nėra, adata gali būti neesterili ir sąlygoti infekciją.

Apžiūrėkite lancetą. Jeigu apsauginis dangtelis deformuotas, įtrūkęs ar kitaip apgadintas, lanceto nenaudokite. Jeigu apsauginio dangtelio nėra arba neuždengta kuri nors adatos dalis, lanceto nenaudokite. Lancetą išmeskite.

- Naudotas lancetas gali pernešti infekcijas. Lancetą kraujui imti naudokite tik vieną kartą. Paėmę kraujo, panaudotą lancetą visada išmeskite.
- Retais atvejais, paėmus kraujo lancetas netraukiamas į dūrimo prietaisą. Patikrinkite, ar paėmus kraujo lancetas nėra išsikišęs. Jeigu lancetas išsikišęs, atsargiai nuimkite dangtelį. Išstumkite ir išmeskite lancetą.

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Infekcijos rizika

- Dėl nenuvalytos dūrio vietos gali kilti infekcija. Prieš imdami kraują nuvalykite dūrio vietą.
- Jei lanceto naudojimo tinkamumo laikas pasibaigęs, lancetas gali būti neesterilus. Naudokite tik tuos lancetus, kurių tinkamumo laikas nepasibaigė. Tinkamumo laikas nurodytas ant pakutės šalia simbolio

Vadovaukitės paveikslėliuose pateiktomis instrukcijomis.

Paėmę kraujo, iš karto pamatuokite gliukozę kraujyje pagal gliukozės kiekio kraujyje matuoklio naudojimo taisykles.

Veikimo sąlygos

Dūrimo prietaisą ir priedus naudokite esant šioms veikimo sąlygoms:

- Temperatūros diapazonas: nuo +5 iki +45 °C
- Santykinės drėgmės diapazonas: 5–90 %

Dūrimo prietaiso ir lancetų laikymas

Nelaikykite dūrimo prietaiso užtaisyto. Nelaikykite dūrimo prietaiso ir lancetų ten, kur gali būti ekstremali temperatūra, pavyzdžiui, įkaitusiame automobilyje. Tai gali sutrikdyti dūrimo prietaiso ir lancetų veikimą. Dūrimo prietaisą visada laikykite be įdėto lanceto.

Dūrimo prietaiso ir dangtelio valymas bei dezinfekcija

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Infekcijos rizika

Jeigu dūrimo prietaisas arba dangtelis susilietė su krauju, jie gali pernešti infekcijas.

Prieš perduodant dūrimo prietaisą ir dangtelį kitam asmeniui, pavyzdžiui, kad jums padėtų, juos nuvalykite ir dezinfekuokite.

Siekiant užkirsti kelią infekcijų perdavimui, dūrimo prietaisą ir dangtelį kas tam tikrą laikotarpį turite valyti ir dezinfekuoti:

- ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę,
- jeigu ant dūrimo prietaiso arba dangtelio prilipę kraujo,
- kaskart prieš paimant dūrimo prietaisą kitam asmeniui, pvz., kuris jums padeda.

Reikės 3 nesiviliančių šluosčių, vandens ir 70 % izopropanolio. Dezinfekcijai naudojama šluostė turi būti pakankamai didelė, kad į ją būtų galima įvynioti dūrimo prietaisą.

Prieš dezinfekuodami dūrimo prietaisą ir dangtelį, pirmiausia juos išvalykite, pašalindami kraują ir kitus nesvarumus.

Kad nepažeistumėte dūrimo prietaiso ir dangtelio:

- Nenardinkite **dūrimo prietaiso ir dangtelio į skystį**.
- Valydami naudokite tik vandenį, dezinfekuodami – tik 70 % izopropanolį.

- Nuimkite dūrimo prietaiso dangtelį.
- Išstumkite lancetą.
- Valykite vandeniu sudrėkinta pirmąja šluoste.
- Dūrimo prietaisą ir dangtelį kruopščiai šluostykite drėgna šluoste. Dūrimo prietaisą valykite tik iš išorės, o dangtelį – iš išorės ir vidaus.
- Sausa antrąja šluoste nusausinkite dūrimo prietaisą ir dangtelį.
- Dezinfekuokite 70 % izopropanoliu sudrėkinta trečiąja šluoste.
- Dūrimo prietaisą ir dangtelį 2 minutes kruopščiai nušluostykite izopropanoliu sudrėkinta šluoste. Dūrimo prietaisą valykite tik iš išorės, o dangtelį – iš išorės ir vidaus.
- Vėl uždėkite dangtelį.
- Visą dūrimo prietaisą įvyniokite į izopropanoliu sudrėkintą šluostę.
- Įvyniotą dūrimo prietaisą palikite 8 minutėms.
- Tada dūrimo prietaisą išvyniokite ir palikite išdžiūti ore.

Panaudoto lanceto išmetimas

ĮSPĖJIMAS

Infekcijos rizika

Naudotas lancetas gali pernešti infekcijas.

Panaudotą lanceto adatą galima netyčia paliesti. Todėl lancetą reikia išmesti taip, kad niekas negalėtų susižeisti. Pavyzdžiui, įdėkite lancetą į aštrių atliekų šalinimo talpyklą.

Dūrimo prietaiso išmetimas

ATSARGUMO PRIEMONĖ

Infekcijos rizika

Jeigu dūrimo prietaisas susilietė su krauju, jis gali perduoti infekcijas.

Panaudotą dūrimo prietaisą išmeskite kaip infekcinę medžiagą, laikydamiesi šalyje galiojančių taisyklių.

Nepanaudotą dūrimo prietaisą šalinkite kaip plastiko atliekas.

Informacijos, kaip tinkamai išmesti dūrimo prietaisą, kreipkitės į vietos savivaldybę ar valdžios instituciją.

Užsakymo informacija

Jeigu norite užsisakyti „Accu-Chek Softclix“ gaminių, kreipkitės į klientų aptarnavimą (žr. skyrį *Klientų aptarnavimas*).

Pranešimas apie rimtus incidentus

Pacientui / naudotojui / trečiajai šaliai Europos Sąjungoje ir šalyse, turinčiose vienodą priežiūros sistemą; jei šio prietaiso naudojimo metu arba dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie tai gamintojui ir jūsų nacionalinei institucijai.

Paskutinis atnaujinimas

2024-07

Klientų aptarnavimas

Lietuva

Klientų aptarnavimo ir techninės priežiūros centras: Nemokama telefono linija 8 800 20011
www.accu-chek.lt

LT

ACCU-CHEK®
Softclix

Dūrimo prietaisas ir lancetas

	Laikytis naudojimo taisyklių (mėlynas simbolis)
	Žiūrėti naudojimo taisykles arba elektronines naudojimo taisykles
	Naudoti iki
STERILE R	Sterilizuota švitinant
	Pakartotinai nenaudoti
	Daugkartinio naudojimo tik vienam pacientui
	Nusiplaukite rankas (mėlynas simbolis)
	Pagaminimo data
MD	Medicinos priemonė
	Gamintojas
UDI	Unikalus prietaiso identifikatorius
REF	Kataloginis numeris
LOT	Partijos kodas
	Atitinka atitinkamų ES teisės aktų nuostatas
	0123

„Accu-Chek Softclix“ dūrimo prietaisas

„Accu-Chek Softclix“ lancetai

ACCU-CHEK ir SOFTCLIX yra „Roche“ prekių ženklai.

© 2024 m. „Roche Diabetes Care“

„Roche Diabetes Care GmbH“
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Vokietija
www.accu-chek.com