

Accu-CHEK® Performa



Pirmie soļi

Īsā instrukcija

Accu-CHEK®



BRĪDINĀJUMS

- Šī īsā instrukcija neaizstāj Accu-Chek Performa glikometra lietotāja rokasgrāmatu. Lietotāja rokasgrāmatā ir sniegti svarīgi lietošanas norādījumi, kā arī papild-informācija.
- Autolancete ir paredzēta tikai personīgai lietošanai.



Autolancetes sagatavošana

1 Aktivizēšanas poga Izgrūdejs Uzgalis Sagatavošanas poga Duršanas dziļums

Iepazīstieties ar Accu-Chek Softclix autolanceti.

2

Izņemiet lanceti no maciņa kabatas.

3

Noņemiet uzgali, to taisni pavelkot. Negrieziet uzgali.

4

Ievietojiet lanceti autolancetē, līdz tā noklikšķ.

5

Pagriežot noņemiet lancetes aizsargājošo vāciņu.

6

Uzlieciet uzgali atpakaļ uz autolancetes. Pārliecinieties, vai uzgala pozicionēšanas robiņš atrodas preti autolancetes pozicionēšanas robiņam.

7

Pielāgojiet lanceti tā, lai dūriena dziļums būtu ērts. Sākotnēji izvēlieties 2. Ja āda ir stingrāka, izvēlieties lielāku ciparu.

8

Nospiediet sagatavošanas pogu līdz galam, līdzīgi kā pildspalvu. Nespiediet aktivizēšanas pogu laikā, kad spiežat sagatavošanas pogu. Kad autolancete ir gatava lietošanai, aktivizēšanas poga kļūst dzeltena.

9

Nolieciet autolanceti līdz brīdim, kad būs gatavs veikt dūrienu pirkstā.

Glikozes testa veikšana

1

Pirms testa veikšanas nomazgājiet un nosusiniet rokas.

2

Pārbaudiet uz teststrēmeļu kārbas norādīto derīguma termiņu. Nelietojiet teststrēmes, ja to derīguma termiņš ir beidzies.

3

Izņemiet no kārbas vienu teststrēmi. Cieši aizveriet vāciņu.

4

Ievietojiet teststrēmi mērāparātā ar bultiņām norādītajā virzienā, līdz mērāparāts iepikstas.

5

Stingri piespiediet autolanceti pirkstgala sānu daļai un nospiediet dzelteno aktivizēšanas pogu, lai veiktu dūrienu pirkstā.

6

Ar teststrēmes galu pieskarieties asins pilienam. Nolieciet asinis uz teststrēmes virsmas.

7

Ja uz teststrēmes ir pietiekams asins daudzums, mērāparāts iepikstas un displejā sāk mirgot simbols

8

Pēc 5 sekundēm testa rezultāts tiek parādīts displejā.

9

Noņemiet autolancetes uzgali. Pārvērsiet lanceti prom no sevis. Izvelciet izgrūdeju, lai atbrīvotu lanceti.

Kļūdu ziņojumi

Ja displejā tiek parādīts kāds no šiem kļūdu ziņojumiem, nekavējoties skatiet sadaļu „Displejā redzami ziņojumi un kļūdu ziņojumi” lietotāja rokasgrāmatas 5. nodaļā.

E-1 Teststrēme var būt bojāta vai ievietota nepareizi. Izņemiet teststrēmi un ievietojiet to atkārtoti vai arī nomainiet teststrēmi, ja tā ir bojāta.

E-3 Glikozes līmenis asinīs, iespējams, ir ļoti augsts vai arī ir radusies kļūda mērāparātā vai teststrēmē. Ja testa rezultāts atbilst Jūsu pašsajūtai, atkārtotiet glikozes testu. Skatiet sadaļu Neparasti glikozes testa rezultāti lietotāja rokasgrāmatas 2. nodaļā. Ja otrā testa rezultāts neatbilst Jūsu pašsajūtai, veiciet funkcionālo pārbaudi, izmantojot kontrolšķidrumu un jaunu teststrēmi. Ja funkcionāls pārbaudes rezultāts atbilst pieļaujamam diapazonam, pārskatiet pareizas testa veikšanas norādījumus un atkārtotiet glikozes testu ar jaunu teststrēmi. Ja pēc glikozes testa tomēr atkal tiek parādīts kods E-3, iespējams, ka glikozes testa rezultāts ir ļoti augsts un pārsniedz sistēmas rādītāju noteikšanas diapazonu. **Nekavējoties sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu.** Ja funkcionāls pārbaudes rezultāts nav pieļaujamā diapazonā, skatiet sadaļu Ārpus diapazona esošu funkcionāls pārbaudes rezultātu interpretācija lietotāja rokasgrāmatas 4. nodaļā.

E-4 Veicot testu, teststrēme nav uzņēmusi pietiekamu daudzumu asiņu vai kontrolšķiduma, vai arī asinis vai kontrolšķidums tika uzlikti, kad tests jau bija sācies. Izmetiet teststrēmi un atkārtotiet glikozes testu vai funkcionālo pārbaudi.

E-6 Asinis vai kontrolšķidums tika uzlikts teststrēmei, pirms displejā tika parādīts mirgojošs piliena simbols. Izmetiet teststrēmi un atkārtotiet glikozes testu vai funkcionālo pārbaudi.

E-7 Radusies elektroniska kļūda vai (retos gadījumos) jau izmantota teststrēme tikusi izņemta un ievietota vēlreiz. Izslēdziet un ieslēdziet mērāparātu vai izņemiet bateriju uz 20 sekundēm un ievietojiet to vēlreiz. Veiciet glikozes testu vai funkcionālo pārbaudi.

E-8 Temperatūra ir augstāka vai zemāka par sistēmas darbībai nepieciešamo temperatūras diapazonu. Sistēmas lietošanas nosacījumus skatiet teststrēmeļu iepakojuma ieliktņā. Dodieties uz vietu, kur nosacījumi ir atbilstoši, nogaidiet 5 minūtes un atkārtotiet glikozes testu vai funkcionālo pārbaudi.

E-9 Baterija ir gandrīz tukša. Nekavējoties nomainiet bateriju. Ja šis ziņojums tiek atkārtoti parādīts arī pēc baterijas maiņas, atkārtoti izņemiet bateriju, nospiediet jebkuru mērāparāta taustiņu un ielieciet bateriju atpakaļ.

E-10 Iespējams, nav pareizi laika un datuma iestatījumi. Pārlecinieties, vai laiks un datums ir pareizi, un, ja nepieciešams, pielāgojiet tos.

PIEZĪME

Ja kļūdas ziņojums tiek parādīts atkārtoti, sazinieties ar Roche.

PĒDĒJĀ REDAKCIJA: 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-check.com



ACCU-CHEK, ACCU-CHEK PERFORMA, and SOFTCLIX are trademarks of Roche.
© 2013 Roche Diagnostics
07054360001(01)-0713

This file may not print or view at 100%.
Die lines and color breaks do not print.

- Roche USA – 51860
V4/1 – 07054360001(01) – Black
- Roche USA – 51860
V4/2 – 07054360001(01) – Cyan
- Roche USA – 51860
V4/3 – 07054360001(01) – Magenta
- Roche USA – 51860
V4/4 – 07054360001(01) – Yellow

ACCUCHEK® Performa



Naudojimo nurodymai

Pirmojo naudojimo vadovas

ACCUCHEK®



ĮSPĖJIMAS


- Šis pirmojo naudojimo vadovas negali pakeisti Accu-Chek Performa gliukozės kiekio kraujyje matuoklio naudotojo vadovo. Naudotojo vadove yra svarbios priežiūros instrukcijos ir papildoma informacija.
- Dūrimo prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui.

Matuoklio apžvalga




- 1 Įjungimo / patvirtinimo mygtukas
- 2 Ekranas
- 3 Dešinysis ir kairysis mygtukai su rodyklėmis
- 4 Anga tyrimo juostelei
- 5 Baterijos skyriaus dangtelis
- 6 Infraraudonųjų spindulių (IR) langelis


Dūrimo prietaiso užtaisymas

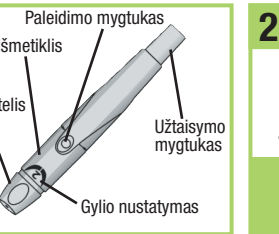


Susipažinkite su Accu-Chek Softclix dūrimo prietaisu.

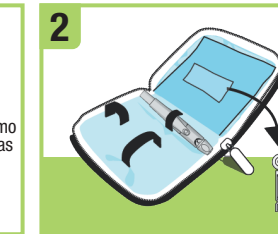


Išimkite lancetą iš nešiojamo dėklo kišenėlės.

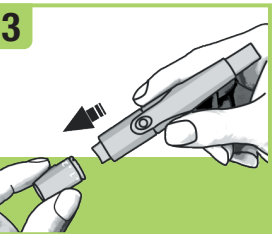


Nuimkite dangtelį patraukdami. Nesukinėkite dangtelio.

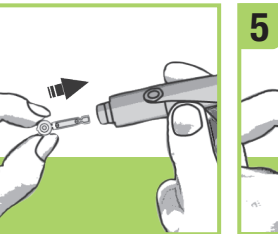

Įkiškite lancetą į dūrimo prietaisą, kol spragtelės.

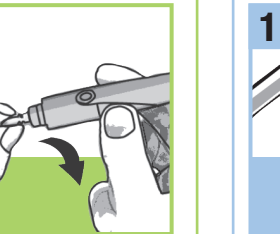


Atsukite apsauginį lanceto dangtelį.

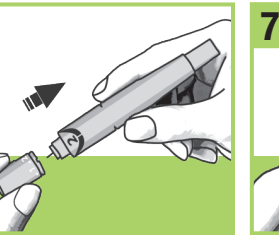


Vėl uždėkite dūrimo prietaiso dangtelį. Patikrinkite, ar sutampa kreipiamieji dangtelio ir dūrimo prietaiso grioveliai.



Nustatykite lanceto gylį, kad įdūrimo gylis būtų jums patogus. Pradėkite nuo 2. Jeigu oda kietesnė, nustatykite didesnę skaičių.

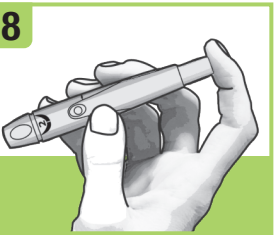


Nuspauskite užtaisymo mygtuką iki galo, kaip rašiklyje. Nuspausdami užtaisymo mygtuką nespauskite paleidimo mygtuko. Kai dūrimo prietaisas paruoštas, paleidimo mygtukas pageltonuoja.

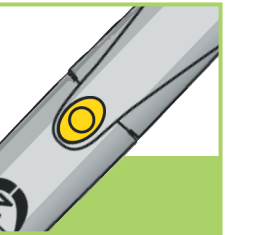


Padėkite dūrimo prietaisą į šalį, kol pasiruošite durti į pirštą.

Gliukozės kiekio kraujyje tyrimo atlikimas

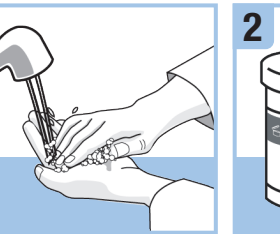


Prieš atlikdami tyrimą nusiplaukite ir nusausinkite rankas.

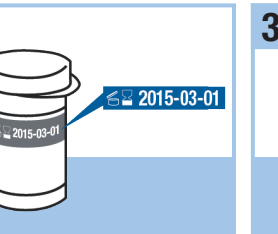


Patikrinkite ant tyrimo juostelių indelio nurodytą tinkamumo laiką. Nenaudokite tyrimo juostelių, kurių tinkamumo laikas jau pasibaigęs.




Paimkite vieną tyrimo juostelę iš tyrimo juostelių indelio. Sandariai uždarykite dangtelį.

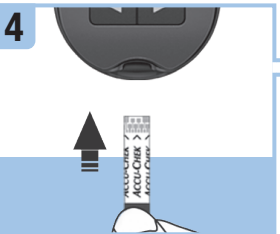


Tyrimo juostelę įkiškite į matuoklį rodyklių kryptimi, kol matuoklis supypsės.

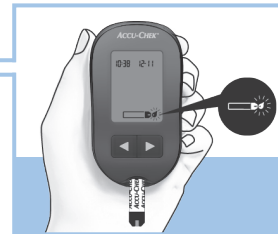


Pasirodys mirksintis kraujo lašo simbolis.

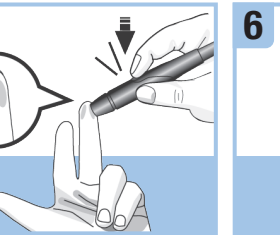


Laikykite dūrimo prietaisą tvirtai prie piršto galiuko krašto ir paspauskite geltoną paleidimo mygtuką, pradurkite pirštą.

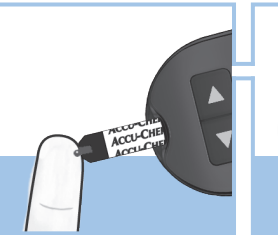

Tyrimo juostelės galu palieskite kraujo lašą. Nelašinkite kraujo ant tyrimo juostelės viršaus.

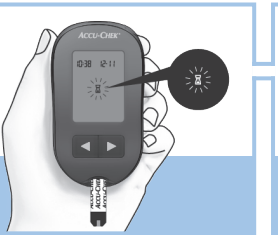

Kai ant tyrimo juostelės bus pakankamai kraujo, matuoklis supypsės ir pradės mirksėti simbolis.

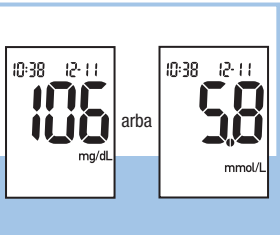

Po 5 sekundžių ekrane pasirodys tyrimo rezultatas.



Nuimkite dūrimo prietaiso dangtelį. Nukreipkite lancetą nuo savęs. Paslinkite išmetiklį, kad atlaisvintumėte lancetą.

Klaidos pranešimai

Jei kuriuo nors metu ekrane pasirodys kuris nors klaidos pranešimas, nedelsdami skaitykite naudotojo vadovo 5 skyrių, Pranešimai ekrane ir klaidos pranešimai.

E-1 Tyrimo juostelė gali būti sugadinta arba netinkamai įdėta. Išimkite ir vėl įdėkite tyrimo juostelę arba pakeiskite, jei ji sugadinta.

E-3 Jūsų gliukozės kiekis kraujyje gali būti labai didelis arba įvyko matuoklio ar tyrimo juostelės klaida. Jei tyrimo rezultatas atitinka jūsų savijautą, nedelsdami kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą. Jei tyrimo rezultatas neatitinka jūsų savijautos, pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą. Žr. naudotojo vadovo 2 skyrių. Neįprasti gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatai. Jei gautas antrą tyrimo rezultatas neatitinka jūsų savijautos, atlikite kontrolinį tyrimą naudodami kontrolinį tirpalą ir naują tyrimo juostelę. Jei kontrolinio tyrimo rezultatas yra priimtinas ribose, patikrinkite, ar tinkamai atliekamas tyrimas, ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą su nauja tyrimo juostele. Jei atlikus gliukozės kiekio kraujyje tyrimą vis tiek pasirodo kodas E-3, gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatas gali būti labai didelis ir viršyti sistemos matavimo reikšmių ribas. **Nedelsdami kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.** Jei kontrolinio tyrimo rezultatas nepatenka į priimtinas ribas, žr. naudotojo vadovo 4 skyrių. Kontrolinio tyrimo rezultaty, nepatenkančių į priimtinas ribas, paaiškinimas.

E-4 Kraujo ar kontrolinio tirpalo ant tyrimo juostelės pateko nepakankamai, kad jo užtektų matavimams atlikti, arba jų pateko po to, kai tyrimas prasidėjo. Išmeskite tyrimo juostelę ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje ar kontrolinį tyrimą.

E-6 Kraujas arba kontrolinis tirpalas ant tyrimo juostelės pateko anksčiau, nei ekrane pasirodė mirksintis lašo simbolis. Išmeskite tyrimo juostelę ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje ar kontrolinį tyrimą.

E-7 Elektronikos klaida arba, retais atvejais, buvo išimta ir vėl įdėta panaudota tyrimo juostelė. Išjunkite ir vėl įjunkite matuoklį arba 20 sekundžių išimkite bateriją ir vėl ją įdėkite. Atlikite gliukozės kiekio kraujyje arba kontrolinį tyrimą.

E-8 Matavimo metu temperatūra viršija arba nesiekia sistemoje leistinų ribų. Apie sistemos veikimo sąlygas skaitykite tyrimo juostelių pakuotės lapelyje. Pereikite į tokią vietą, kurioje sąlygos yra tinkamos, palaukite 5 minutes ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje arba kontrolinį tyrimą. Matuoklio dirbtinai nešildykite ir nešaldykite.

E-9 Baterija beveik išsielekvo. Iškart pakeiskite bateriją. Jei pakeitus bateriją pranešimas vėl pasirodo, dar kartą išimkite bateriją, nuspauskite bet kurį matuoklio mygtuką ir vėl įdėkite bateriją.

E-10 Gali būti neteisingi laiko ir datos nustatymai. Patikrinkite laiko ir datos nustatymus ir, jei reikia, pakoreguokite.

PASTABA

Jei klaidos pranešimas kartojamas, susisiekite su Roche.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 2013-04

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



ACCUCHEK, ACCUCHEK PERFORMA, and SOFTCLIX are trademarks of Roche.
© 2013 Roche Diagnostics
07054360001(01)-0713