


NAUDOJIMO NURODYMAI

PIRMOJO NAUDOJIMO
VADOVAS

Norėdami rasti diabeto valdymo programėles, suderinamas su jūsų matuokliu, apsilankykite www.accu-chek.com.

Matuoklio apžvalga

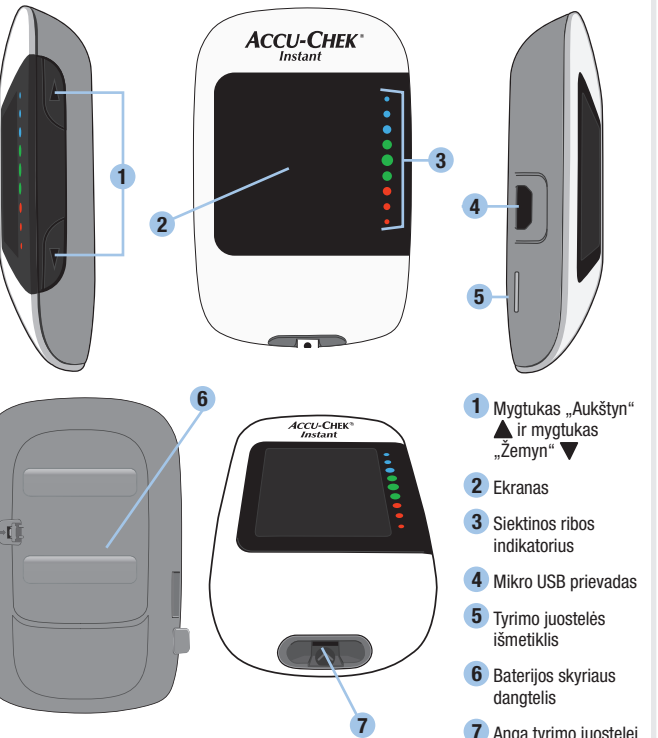

- 1 Mygtukas „Aukštyn“ ▲ ir mygtukas „Žemyn“ ▼
- 2 Ekranas
- 3 Siektinos ribos indikatorius
- 4 Mikro USB prievadas
- 5 Tyrimo juostelės išmetiklis
- 6 Baterijos skyriaus dangtelis
- 7 Anga tyrimo juostelei

Nustatykite laiką ir datą



Matuoklis parągins nustatyti laiką ir datą, kai pirmą kartą jį įjungsite. Ekrane pasirodo **set-up** ir mirksi valanda.


Norėdami padidinti arba sumažinti valandą, spauskite ▲ arba ▼.



Paspauskite ir palaikykite ▲, kad nustatytumėte valandą ir pereitumėte į kitą lauką.

Kartokite 1 ir 2 veiksmus, kol sureguliuosite kiekvieną lauką. Nustatę metus, palaikykite paspaudę ▼, kol pasirodys mirksintis tyrimo juostelės simbolis, kad išsaugotumėte nustatymus.


Užtaisykite dūrimo prietaisą

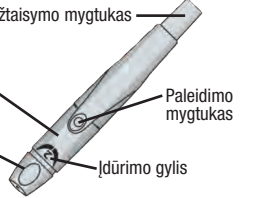


Susipažinkite su Accu-Chek Softclix dūrimo prietaisu.




Nuimkite dūrimo prietaiso dangtelį patraukdami. Nesukinėkite dangtelio.

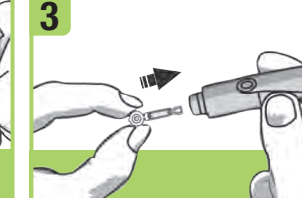

Kiškite lancetą į dūrimo prietaisą, kol spragtelės.

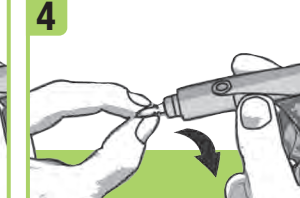

Atsukite lanceto apsauginį dangtelį.

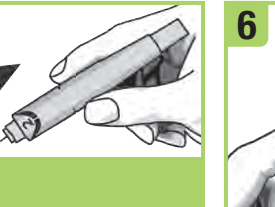

Vėl uždėkite dangtelį ant dūrimo prietaiso. Patikrinkite, ar sutampa kreipiamieji dangtelio ir dūrimo prietaiso grioveliai.



Nustatykite lanceto gylį, kad įdūrimo gylis būtų jums patogus. Pradėkite užtaisymo mygtuką, tuo pačiu metu nustatykite didesnį skaičių.




Nuspauskite užtaisymo mygtuką iki galo, kaip rašiklyje. Nuspausdami užtaisymo mygtuką, tuo pačiu metu nuspauskite paleidimo mygtuko.



Kai dūrimo prietaisas paruoštas, paleidimo mygtukas pageltonuoja. Padėkite dūrimo prietaisą į šalį, kol pasiruošite durti į pirštą.

Atlikite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą

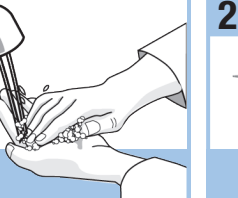


Prieš atlikdami gliukozės kiekio kraujyje tyrimą, nusiplaukite ir nusauskite rankas.




Patikrinkite ant tyrimo juostelių indelio nurodytą tinkamumo laiką. Nenaudokite tyrimo juostelių, kurių tinkamumo laikas jau pasibaigęs.




Paimkite vieną tyrimo juostelę iš tyrimo juostelių indelio. Sandariai uždarykite dangtelį.

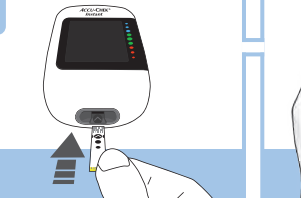


Metalinį tyrimo juostelės galiuką įstatykite į matuoklį.

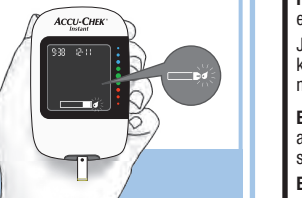


Matuoklis įsijungia. Pasirodo mirksintis lašo simbolis.

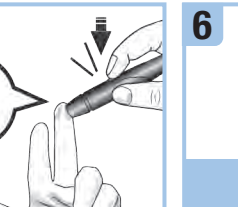


Dūrimo prietaisą tvirtai prispauskite prie piršto galiuko šono ir paspauskite geltoną paleidimo mygtuką, kad pradurtumėte pirštą.

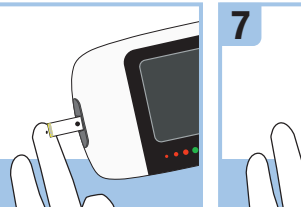

Geltonu tyrimo juostelės kraštu palieskite kraują lašą. Nelašinkite kraujo ant tyrimo juostelės viršaus.

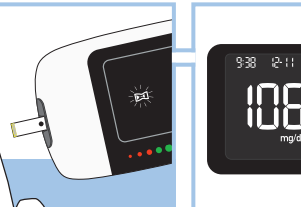

Patraukite pirštą nuo tyrimo juostelės, kai pasirodys mirksintis smėlio laikrodžio simbolis. Jei nepatrauksite piršto nuo tyrimo juostelės, tyrimo rezultatai gali būti netikslūs.

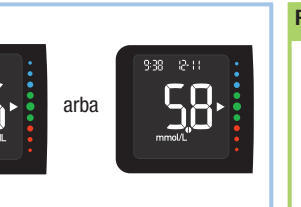

Mažiau nei po 4 sekundžių ekrane pasirodys tyrimo rezultatas.



Nuimkite dūrimo prietaiso dangtelį. Nukreipkite lancetą nuo savęs. Paslinkite išmetiklį, kad atlaisvintumėte lancetą.

Klaidos pranešimai

Pastaba: Esant bet kuriam iš koduotų klaidos pranešimų (nuo E-1 iki E 14), ekrane pakaitomis bus rodomas klaidos kodas ir **Err**.

Jei bet kuriuo metu ekrane bus parodytas kuris nors iš toliau pateiktų klaidos pranešimų, nedelsdami žr. dalį Klaidos pranešimai, esančią naudotojo vadovo skyriuje Matuoklio priežiūra ir trikčių šalinimas.

E-1 Tyrimo juostelė gali būti sugadinta, netinkamai įdėta arba panaudota anksčiau. Išimkite ir vėl įdėkite tyrimo juostelę arba pakeiskite, jei ji buvo sugadinta arba panaudota anksčiau.

E-3 Įvyko matuoklio arba tyrimo juostelės klaida. Šis klaidos pranešimas gali būti rodomas, jei tyrimo juostelių indelio dangtelis nebuvo sandariai uždarytas. Tyrimo juostelės gali būti sugadintos dėl netinkamo laikymo arba naudojimo. **Niekada nedarykite gydymo nurodymų vadovaudamiesi klaidos pranešimais.** Pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą. Jei pasirodo antras E-3 klaidos pranešimas, atlikite kontrolinį tyrimą naudodami kontrolinį tirpalą ir naują tyrimo juostelę. Žr. dalį „Kontrolinio tyrimo atlikimas“, esančią naudotojo vadovo skyriuje „Kontroliniai tyrimai“. Jei ir toliau gaunate E-3 klaidos pranešimą, gliukozės kiekiui kraujyje tirti naudokite kitą metodą, pavyzdžiui, atsarginį matuoklį ir tyrimo juostelę. Jei išsityrus alternatyviu metodu gaunamas ypač didelio gliukozės kiekio kraujyje rezultatas arba jei alternatyvus metodas nėra, **nedelsdami kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.**

Retais atvejais E-3 klaidos pranešimas gali rodyti, kad jūsų gliukozės kraujyje kiekis labai didelis ir viršija sistemos matavimo diapazono ribas. **Jei norite sužinoti apie kitas galimas klaidos pranešimo priežastis, žr. dalį „Neįprasti gliukozės kiekio kraujyje tyrimo rezultatai“, esančią naudotojo vadovo skyriuje „Gliukozės kiekio kraujyje tyrimai“.**

E-4 Kraujo ar kontrolinio tirpalo ant tyrimo juostelės pateko nepakankamai, kad jo užtektų matavimams atlikti, arba jį pateko po to, kai tyrimas prasidėjo. Išmeskite tyrimo juostelę ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą.

E-6 Kraujas arba kontrolinis tirpalas ant tyrimo juostelės pateko anksčiau, nei ekrane pasirodė mirksintis lašo simbolis. Išmeskite tyrimo juostelę ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą.

E-7 Įvyko elektroninė klaida. Išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite bet kurį matuoklio mygtuką bent 2 sekundes, tada vėl įdėkite baterijas. Atlikite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą.

E-8 Matavimo metu temperatūra viršija arba nesiekia sistemoje leistinų ribų. Apie sistemos veikimo sąlygas skaitykite tyrimo juostelių pakuotės lapelyje. Pereikite į tokią vietą, kurioje sąlygos yra tinkamos, ir pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą. Matuoklio dirbtinai nešildykite ir nešaldykite.

E-9 Baterijos gali būti išsikrovusios. Vėl įjunkite matuoklį. **Jei esate šaltoje aplinkoje, pereikite į kitą vietą, kur temperatūra artimesnė įprastai, ir pakartokite tyrimą.** Jei po kelių bandymų pranešimas ir toliau rodomas, pakeiskite baterijas. Jei pakeitus baterijas pranešimas vėl atsiranda, išimkite baterijas, paspauskite ir palaikykite bet kurį matuoklio mygtuką bent 2 sekundes, tada vėl įdėkite baterijas.

E 10 Laiko ir datos nustatymas gali būti neteisingas. Kai matuoklis bando sinchronizuoti laiką ir datą su suporuotu įrenginiu, pasirodo mirksintis belaidžio ryšio simbolis. Kai belaidžio ryšio simbolis neberodomas, paspauskite mygtuką „Aukštyn“, kad išjungtumėte matuoklį. Paspauskite mygtuką „Aukštyn“ antrą kartą ir palaikykite, kol pasirodys mirksintis tyrimo juostelės simbolis. Jei laiko ir datos sinchronizuoti nepavyko, matuoklis paprašys jus nustatyti kitą kartą įjungiant. Žr. dalį „Laiko ir datos nustatymas“, esančią naudotojo vadovo skyriuje „Jūsų naujoji sistema“.

E 11 Tyrimo juostelė gali būti sugadinta. Pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą su nauja tyrimo juostele.

E 12 Jūsų kraujo mėginyje gali būti didelis askorbato lygis. Kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.

E 13 Tyrimo juostelės angoje gali būti skysčio arba pašalinės medžiagos. Ištraukite ir vėl įstatykite tyrimo juostelę arba pakartokite gliukozės kiekio kraujyje tyrimą arba kontrolinį tyrimą naudodami naują tyrimo juostelę. Jei klaida išlieka, susisiekite su Roche.

E 14 Įvyko elektroninė klaida. Susisiekite su Roche.

Pastaba: Jei klaidos pranešimas kartojamas, susisiekite su Roche.

ĮSPĖJIMAS



Gyvybei pavojingų sužalojimų rizika

Laikykite naujas ir naudotas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje. Papildomos informacijos ieškokite šiame naudotojo vadove.

Sunkaus sveikatos sutrikdymo rizika

Šis pirmojo naudojimo vadovas negali pakeisti Accu-Chek Instant gliukozės kiekio kraujyje matuoklio naudotojo vadove. Naudotojo vadove yra svarbios priežiūros instrukcijos ir papildoma informacija.

Infekcijos rizika

Kraujo lašo paėmimo metu dūrimo prietaisas ir dangtelis gali liestis su krauju. Dūrimo prietaisas skirtas tik asmeniniam naudojimui.

PASTABA

- Visada turėkite atsarginį baterijų rinkinį.
- Baterijos veikimo laikas gali kisti dėl tokių veiksnių kaip temperatūra ar baterijos gamintojas.

PASKUTINIS ATNAUJINIMAS: 2021-04

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK INSTANT ir SOFTCLIX yra Roche prekių ženklai.

© 2021 Roche Diabetes Care

09768424061(01)-1021

CE 0123