

Informacija apie cukrinį diabetą ir išsamios ataskaitos po ranka, tad galite jomis pasidalyti su savo gydytoju

Kaip pradėti naudotis programėle *mySugr*


- 1 Atsisiųskite [programėlę mySugr](#) iš App Store arba Google Play.
- 2 Susikurkite *mySugr* paskyrą.
- 3 Gaukite nemokamą prieigą prie *mySugr Pro*, kurioje siūloma išsamesnės PDF ataskaitos funkcija ir dar daugiau:




Susiekite su ja **Accu-Chek®** matuoklį, kad galėtumėte neribotai naudotis Pro versija.



Atidarykite meniu programėlėje *mySugr*

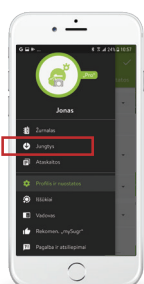

Pasirinkite skiltį „Jungtys“

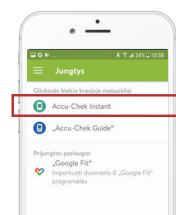

Pasirinkite „Accu-Chek Instant“



Spauskite „Prijungti“



Pasirodžius raginimui, įveskite PIN kodą, nurodytą ant matuoklio nugarėlės




Jei neturite **Accu-Chek®** matuoklio, **Pro** versiją 6 mėnesiams gaukite nemokamai apsilankę <http://shop.mysugr.com/en/voucher> ir įvedę kupono kodą **2020-2020-2020**.
(Kodu galima pasinaudoti iki 2020 m. rugsėjo 30 d.)

- 4 Automatiškai importuokite savo gliukozės kiekio kraujyje rodmenis iš **Accu-Chek®** matuoklio ir (arba) registruokite duomenis rankiniu būdu.


Palaikykite ryšį: dalykitės *mySugr* ataskaitomis su jus prižiūrinčiu specialistu

Dalykitės PDF ataskaitomis, kuriose pateikiami išsamūs 2 savaitių arba 3 mėnesių duomenys apie jūsų diabetą. [Žiūrėkite VIDEO čia.](#)

Ataskaitos rengimas ir dalijimasis duomenimis

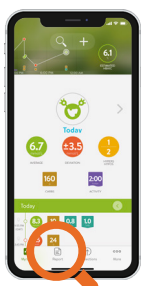


Menu pasirinkite „Ataskaita“ (Report)

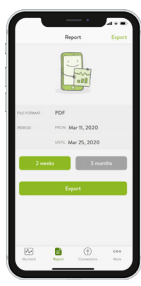

Pasirinkite norimą laikotarpį ir spustelėkite „Eksportuoti“ (Export)



Spustelėkite bendrinimo piktogramą

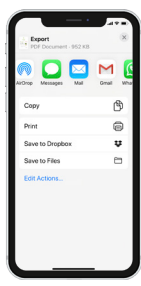

Pasirinkite programėlę, per kurią norite bendrinti ataskaitą



Skambinkite nemokamu klientų aptarnavimo telefonu **8 800 20011**.

ACCUCHEK ir MYSUGR yra Roche prekės ženklai. © 2020 „Roche Diabetes Care, Inc.“. Visos teisės saugomos.

Daugiau nei 2 milijonai registruotų vartotojų.
Vartotojų įvertinimo vidurkis – 4,6 žvaigždutės.